

MEIBOPATCH®

Augenmaske zur Anwendung bei Meibomdrüsen- Dysfunktion

NEU

Um das Meibomdrüsen-Sekret zu lösen,
ist die richtige Temperatur wichtig.

MeiboPatch® erreicht durch ein
einzigartiges Temperaturkontrollsystem
diese effektive Temperatur bei jeder
Anwendung.



1 wiederverwendbare Maske pro Packung

VISUfarma

MEIBOPATCH®

MeiboPatch®:

- besteht aus Baumwolle und enthält Traubenkerne
- für eine effektive Wirkung wird die korrekte Temperatur benötigt. Diese wird bei jeder Anwendung durch den **einzigartigen Temperaturteststreifen** sichergestellt.
- gespeicherte Wärme wird langsam wieder abgegeben
- einfach und wirtschaftlich in der Anwendung
- erhältlich in Apotheken für 28,90 € (UVP);
PZN 12342941

Anwendung des Temperaturteststreifens

ZU KALT:

legen Sie MeiboPatch® erneut für einige Sekunden in die Mikrowelle

IDEALE TEMPERATUR:

Sie können MeiboPatch® verwenden

ZU HEISS:

Lassen Sie die Maske mind. 1 Minute abkühlen und testen Sie dann erneut die Temperatur.



MEIBOPATCH® ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 CE, zur Anwendung bei Meibomdrüsen-Dysfunktion (Blepharitis, Hagelkörnern, Trockenem Auge). Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Packungsbeilage.

Hersteller: Laboratoires Nicox

Kontakt:

VISUfarma GmbH

Kurfürstendamm 21

10719 Berlin

P. +49 (0)30 88706-3127

VISUfarma