

# WARNHINWEISE

Ausführliche Bedienungsanweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

## BATTERIEN

Es ist **SEHR WICHTIG**, dass Sie zwei 1,5v AA (LR6) ALKALI-BATTERIEN verwenden. **WENN SIE ANDERE BATTERIEN VERWENDEN**, besteht das Risiko, dass der Monitor **NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT**. Verwenden Sie bitte **KEINE** wiederaufladbaren Batterien.

Es ist **SEHR WICHTIG**, die Batterien zu wechseln, sobald auf dem Monitor eine entsprechende Aufforderung erscheint. **WENN SIE DIESER AUFFORDERUNG NICHT NACHGEHEN**, besteht das Risiko, dass Ihre **GESPEICHERTEN ZYKLUSDATEN VERLOREN GEHEN** und Sie mit der Erfassung Ihrer Zyklusdaten erneut beginnen müssen.

Entsorgen Sie die Batterien gemäß der gültigen Recycling-Vorgaben. **VORSICHT**: Die Batterien nicht auseinanderbauen, erneut aufladen oder zur Entsorgung verbrennen.


## EINSETZEN DES TEST- STÄBCHENS

Die folgenden Schritte veranschaulichen das Einsetzen des Teststäbchens in den Verhütungsmonitor nach der Urinentnahme. Das richtige Einführen des Teststäbchens in den Monitor ist **SEHR WICHTIG**.

1. Entfernen Sie die Kappe



2. Setzen Sie die Kappe auf den hinteren Teil des Teststäbchens

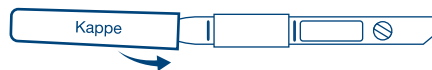

3. Schalten Sie den Monitor an. Führen Sie das Teststäbchen ein.



## BERATUNGSSERVICE

Wenden Sie sich bei Fragen zum Einrichten des Monitors an unseren Beratungsservice. Die Kontaktinformationen können Sie der Gebrauchsanweisung entnehmen.