

Gebrauchsanweisung: mikrozid® AF Tücher/liquid/wipes *premium* Qualität. Sicherheit. schülke.



Indikationen:

Reinigungs- und Desinfektionstücher für Arbeitsflächen und medizinische Geräte

- strapazierfähig und gut imprägniert, kein Zerreißen, kein Zusammendrehen der Tücher
- hinterlässt keine Spuren, klebt nicht. Angenehme Duftnote
- die Tenside ermöglichen eine gute Benetzung der Oberflächen

Anwendungsmethoden /-hinweise:

mikrozid® AF Tücher

- mit einem ersten Desinfektionstuch reinigen. Auf vollständige Benetzung aller Oberflächen achten
- Vorgang mit einem zweiten Tuch, diesmal zur Desinfektion, wiederholen. Trocknen lassen
- Behälter mikrozid® AF Tücher mit 150 Stück und Jumbo Tücher mit 200 Stück nachfüllbar

mikrozid® AF liquid

- unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen
- auf vollständige Benetzung achten, max. 50 ml/m². Ggf. überschüssige Präparatemen- gen mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen

Alkoholempfindliche Flächen (wie z. B. Acrylglas) dürfen nicht behandelt werden.

Normierung:

- wirksam gegen Bakterien (inkl. Tb) und (C. albicans) (geprüft nach DGHM-Richtlinien)
- viruzid*, HIV, HBV, HCV, Adeno-, Rota, Papova-, und Polioviren (30 Minuten)
- wirksam gegen Bakterien und Pilze innerh. 1 Min.
- DGHM/VAH-gelistet
- Produkt biologisch abbaubar (gemäß Test- methode OECD 301D)
- Packmittel recyclingfähig

* gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

[CE 0297]



Schritt 1

Zum Schutz der Haut Handschuhe anziehen.

mikrozid® AF Tücher



Schritt 2

Tuch aus der Dose nehmen und Oberfläche mit getränktem Tuch gründlich wischen, um sie zu reinigen und zu desinfizieren.



Schritt 3

Auf vollständige Benetzung achten. Zur Anwendung auf besonders großen Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden.



Schritt 4

Für eine optimale Wirkung trocknen lassen, bis die Lösung sich vollständig verflüchtigt hat.



Schritt 5

Nachfüllpack oben aufschneiden und kompletten Beutel in die Dose einsetzen. Sticker mit Verfalls- datum und Chargennummer vorher abziehen und auf die Dose kleben.


mikrozid® AF liquid



Schritt 2

Mit schülke wipes oder Einmaltuch.

Desinfektionsmittel unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen. Einwirken und trocknen lassen.

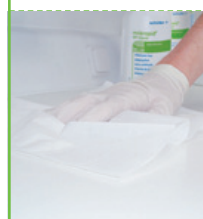

Schritt 3

Verschmutzte Oberfläche:

Technik: Aufbringen – Wischen – Aufbringen

Überschüssige Präparatemen- gen mit einem un- gefärbten Einmaltuch entfernen. Trocknen lassen.

Benötigen Sie Informationen?

Kontaktieren Sie uns: Schülke & Mayr GmbH | D-22840 Norderstedt | Tel. +49-40-521 00-666 | Fax +49-40-521 00-660 | www.schuelke.com | info@schuelke.com