




3060

aerosonic[®]

Inhalieren mit Ultraschall


mobil

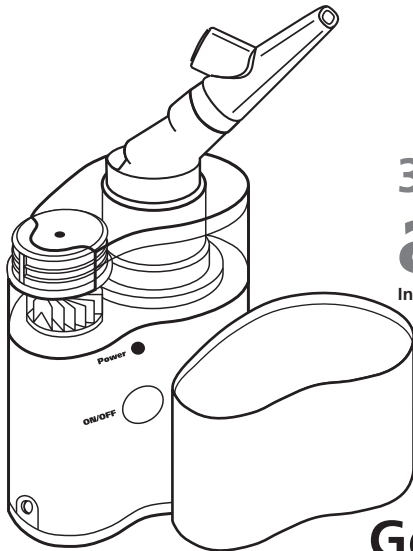

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch

Geräteübersicht

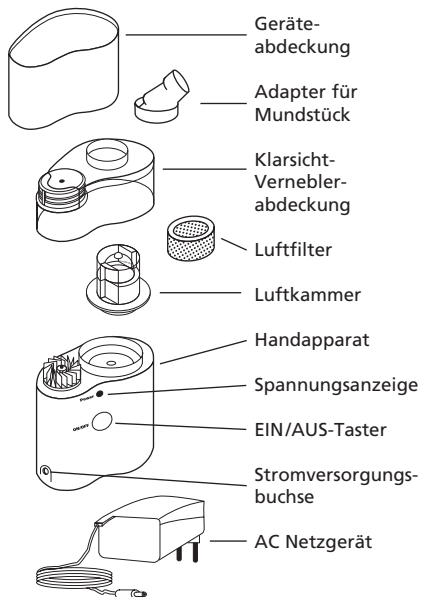

Inhaltsverzeichnis

Geräteübersicht	2	Betrieb und Aufladen des Akkus	16
Einleitung und allgemeine Hinweise	4	Ersatzteile/Verbrauchsmaterial	17
Wichtige Hinweise	6	Erklärung der Zeichen	18
Inbetriebnahme	8	Technische Daten	19
Reinigung und Wartung	12	Garantiebedingungen	20
Wechseln des Luftfilters	14	Hinweise zur Entsorgung	21
Hinweise bei Betriebsstörungen	15		

Liebe Patientin, lieber Patient

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines 3060 aerosonic® mobil, ein Ultraschall-Inhalationsgerät zur vorbeugenden und therapeutischen Tiefeninhalation, das den neuesten medizinischen Erkenntnissen entspricht.

Das Gerät ist jedoch nicht für lebenserhaltende Sofortmaßnahmen konzipiert.

Der 3060 aerosonic® mobil ist sowohl im Heimbereich als auch auf Reisen dank seiner universellen Spannungsversorgung, ob Netz, ob Zigarettenanzünder-Adapter oder Akku einsetzbar.

Das Gerät ist mit dem System des geschlossenen Transfer-Medium-Behälters ausgestattet und ist dadurch leicht zu bedienen.


Das Gerät arbeitet mit einem permanenten Aerosolflow. Die Stärke des Flows kann durch eine Verstellung des Lüfterrades eingestellt werden.

- Optimale Tiefenwirkung
- Hohe Verneblerleistung und kurze Inhalationszeit
- Einfache und sichere Bedienung
- Leichte Reinigung
- Geräuscharmer Betrieb
- Klein und leicht zu transportieren
- Für die Verneblung aller üblichen Inhalationslösungen geeignet

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten. Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Service-Telefon: 03 67 35 / 463-0).

Folgende Komponenten sind in der Grundausrüstung enthalten:

- 1 Gerät komplett mit Verneblerabdeckung und Geräteabdeckung
- 1 Adapter für Mundstück
- 1 Mundstück
- 1 Kindermaske
- 1 Erwachsenenmaske
- 1 Nasengabel
- 2 Filtereinsätze
- 1 AC Netzgerät
- 1 Gebrauchsanweisung und Garantiekarte
- 1 Tragetasche

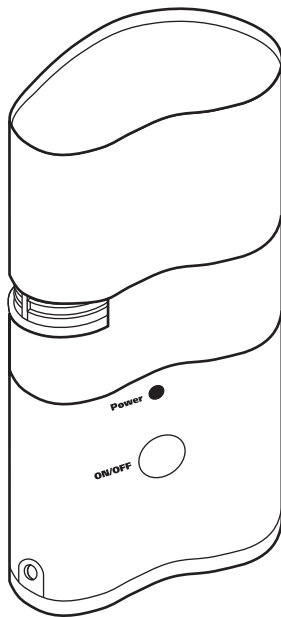


Was sollten Sie beachten

Mit dem Gerät 3060 aerosonic® mobil können alle Inhalationslösungen auf wässriger Basis vernebelt werden, auch Suspensionen, aber keine Lösungen, die ätherische Öle enthalten.

- Verwenden Sie nur Medikamente, die der Arzt verordnet oder empfohlen hat.
- Sollten Sie versehentlich ein falsches Medikament inhaliert haben, so verständigen Sie sofort Ihren Arzt.
- Füllen Sie die Medikamentenkammer mit max. 8 ml des Medikamentes.
- Verwenden Sie keine Medikamentenreste früherer Inhalationen, es sei denn auf ausdrückliche Anweisung des Arztes.
- **Beschädigen, kratzen oder durchstoßen Sie die Medikamentenkammer nicht.**
- Atmen Sie ruhig und gleichmäßig. Zur Gewöhnung an den Aerosolnebel sollten Sie während der ersten 3 bis 4 Atemzüge nur oberflächlich atmen.
- Halten Sie nach dem Einatmen den Atem kurz an (ca. 2 Sekunden), damit sich das Medikamenten-Aerosol gut in den Atemwegen absetzen kann.
- Reinigen Sie den 3060 aerosonic® mobil nach jeder Inhalation sorgfältig.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Führen Sie die Inhalationstherapie nach den Anweisungen Ihres Arztes durch.
- Entfernen Sie die Verneblerabdeckung nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Die Haftung für die sichere Funktion des Gerätes geht auf den Betreiber über, wenn eine Handlung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Zubehörteile auf Veränderungen und tauschen Sie diese entsprechend den Hinweisen aus.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich keine Flüssigkeit in der Medikamentenkammer befindet.
- Trennen Sie den Vernebler vom Netz, wenn er nicht benutzt wird.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Dieses Gerät darf nur von autorisierten Stellen repariert werden.
- Das Gerät ist nicht mikrowellengeeignet.

Funktionsprinzip

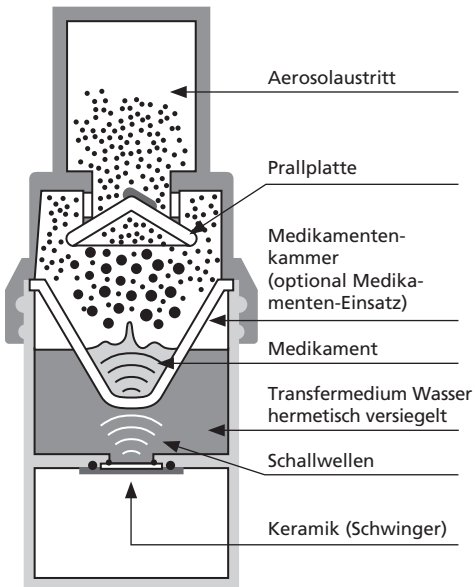

In dem Ultraschallvernebler mit dem geschlossenen Zwei-Kammer-System befindet sich das Transferwasser in einer hermetisch versiegelten Kammer. Dies vereinfacht die Anwendung, da der Patient vor der Inhalation nur das zu vernebelnde Medium oder das Medikament einfüllen muss.

Bei diesem Verfahren werden die Ultraschallschwingungen von der Keramik über das Transferwasser auf das Medikament übertragen.

Inbetriebnahme

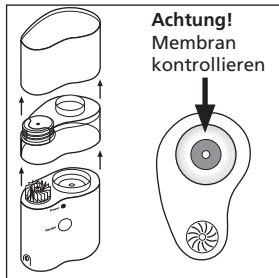


Abb. 1

1. Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung und nehmen Sie den Deckel vom Gerät ab. Entfernen Sie anschließend die Verneblerabdeckung. Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch die Kunststoff-Membran am Boden der Medikamentenkammer. Sollte diese Beschädigungen aufweisen, benutzen Sie das Gerät nicht, sondern wenden sich bitte an eine Servicestelle.

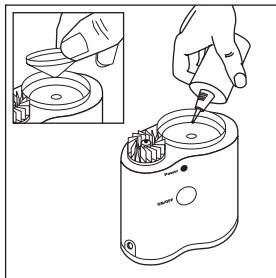


Abb. 2

2. Wenn die Membran in Ordnung ist, füllen Sie das Medikament in die Medikamentenkammer ein (max. 8 ml). Optional kann auch ein Medikamenten-Einsatz benutzt werden (siehe kleine Abb.). In diesem Fall müssen zwischen Medikamentenkammer und Medikamenten-Einsatz ca 1 ml Transferwasser eingefüllt werden. Der Medikamenten-Einsatz kann mit max. 6 ml Medikament befüllt werden.

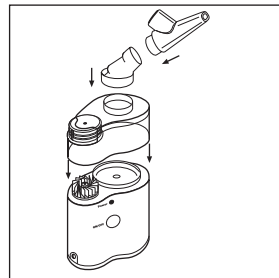


Abb. 3

Inhalation mit Mundstück
3. Setzen Sie die Verneblerabdeckung wieder auf das Gerät. Stecken Sie den Adapter auf den Dom der Verneblerabdeckung. Stecken Sie dann das Mundstück in die dafür vorgesehene Öffnung des Adapters.

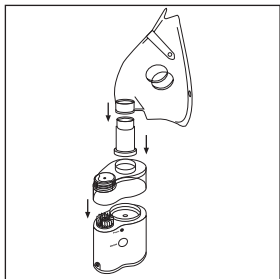


Abb. 4

Inhalation mit Maske

4. Setzen Sie die Verneblerabdeckung wieder auf das Gerät. Stecken Sie die Maske mit Hilfe des Maskenadapters auf den Dom der Verneblerabdeckung.

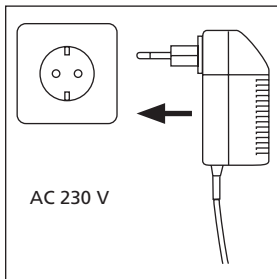


Abb. 5

5. Stecken Sie das Netzgerät in eine Netzsteckdose (siehe Abb.).

Bitte beachten Sie

Den Vernebler 3060 aerosonic® mobil nicht in Feuchträumen (z. B. Badezimmer) verwenden. Gefahr eines Stromschlages.

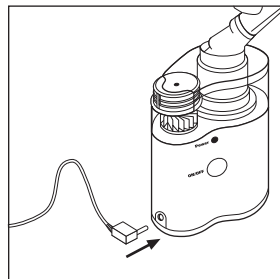


Abb. 6

6. Stecken Sie den 12 V DC-Stecker des Netzgeräts oder des Akkus oder des Zigarettenanzünder-Adapters in die Steckerbuchse auf der linken Seite unten am Vernebler (siehe Abb.).

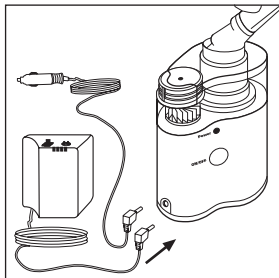


Abb. 7

7. Inbetriebnahme des Geräts mit dem wiederaufladbaren Akku und/oder dem Zigarettenanzünder-Adapter, die beide optional verfügbar sind.

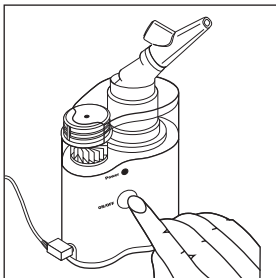


Abb. 8

8. Drücken Sie den EIN/AUS-Taster. Die grüne Funktionsanzeige leuchtet auf und das Gerät beginnt zu arbeiten.

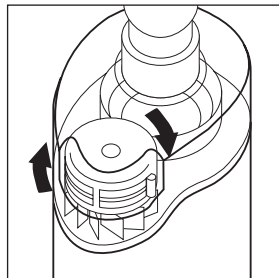


Abb. 9

9. Die Stärke des Flows kann durch eine Verdrehung des Lüfterrades eingestellt werden.

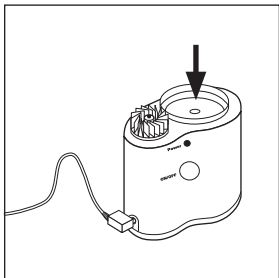


Abb. 10

10. Ein Timer schaltet das Gerät nach 3 Min. Betriebsdauer ab. Wenn die Inhalation fortgesetzt werden soll, prüfen Sie, ob noch genügend Medikament vorhanden ist und füllen Sie ggf. nach. Drücken Sie den EIN/AUS-Taster für einen weiteren Durchlauf. Das Gerät kann insgesamt max. 30 Min. betrieben werden, danach ist eine Abkühlphase von 30 Min. einzuhalten.

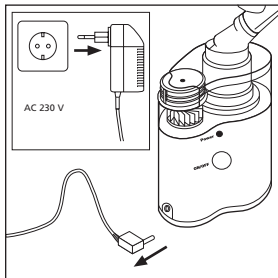


Abb. 11

11. Am Ende der Inhalation schalten Sie das Gerät aus durch drücken auf den EIN/AUS-Taster. Ziehen Sie zunächst den Stecker des Netzgerätes aus der Netzsteckdose (falls zutreffend). Entfernen Sie dann den 12 V Stecker aus der Steckerbuchse auf der unteren linken Seite des Verneblers (siehe Abb.).

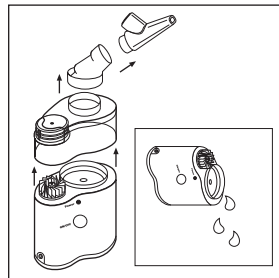


Abb. 12

12. Entfernen Sie die Zubehöreile Mundstück, Adapter, (wenn zutreffend Maske) und Verneblerabdeckung vom Basisgerät. Schütten Sie die nicht mehr zu vernebelnde Restmenge des Medikaments weg und reinigen Sie Basisgerät und Zubehör wie im Abschnitt Reinigung/Desinfektion beschrieben.

Reinigung und Desinfektion


- Trennen Sie vor der Reinigung das Gerät vom Netz und ziehen Sie den 12 V Stecker aus der Stromversorgungsbuchse des Gerätes heraus.

Zur Beachtung

- Es wird empfohlen, das Gerät und das Zubehör nach jeder Inhalation und nach Lagerung über einen längeren Zeitraum zu reinigen und zu desinfizieren, um entstehende Keime zu vernichten.
- Bei chronischen Erkrankungen wird empfohlen, dass die Benutzung des Gerätes nur von einem Patienten erfolgt. Bei Missachtung der Hygieneempfehlungen des Herstellers kann es zu lebensbedrohlichen Erkrankungen kommen.
- Tauchen Sie Gerät, Netzgerät, Akku und Bordspannungselektrolytleitung nie in Wasser ein, da es zu Zerstörungen führen könnte.
- Feuchtigkeit ist ein Nährboden für Keime. Deshalb ist es wichtig, Gerät und Einzelteile nach dem Reinigen und Desinfizieren sorgfältig an der Luft oder mit einem fusselfreien Tuch zu trocknen.

Heimbereich

Alle Teile, die mit dem Patienten oder dem Aerosol in Berührung kommen (Mundstück, Maske, Adapter, Verneblerabdeckung, Luftfilter, Luftfilterab-

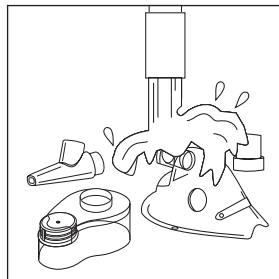

deckung), sind gründlich mit heißem Wasser oder im Geschirrspüler zu reinigen und sollten in regelmäßigen Abständen in für Kunststoffe geeignete Desinfektionsmittel (Gigasept, Perfektan Tb oder Sekusept Plus) desinfiziert werden. Die anschließende sorgfältige Trocknung ist von großer Wichtigkeit. Je nach Beanspruchung der einzelnen Teile sollten diese regelmäßig durch neue ersetzt werden (siehe Ersatzteile). Die Medikamentenkammer des Gerätes ist mit heißem Wasser auszuspülen und mit einem Desinfektionsmittel zu desinfizieren und anschließend zu trocknen. Reinigen Sie das Basisgerät mit einem weichen Tuch, das mit Wasser und einem nicht ätzenden Reinigungsmittel befeuchtet wird.

Praxisbereich


Zur Reinigung wird empfohlen, Handschuhe zu tragen. Alle Einzel-Teile, die mit dem Patienten oder dem Aerosol in Berührung kommen, sind vor Wechsel des Anwenders durch Austausch zu ersetzen. Die Medikamentenkammer des Gerätes ist mit heißem Wasser auszuspülen und mit einem Desinfektionsmittel zu desinfizieren und anschließend zu trocknen.

Für Anwender in der Bundesrepublik Deutschland wird grundsätzlich die Anwendung von Desinfektionsmitteln empfohlen, die in der jeweils aktuellen DGHM* Liste eingetragen sind. Wegen möglicher Schädigung der Materialien eignen sich keine Präparate auf der Basis von halogenabspaltenden Verbindungen, starken organischen Säuren, sauerstoffabspaltenden, alkoholhaltigen oder Lösungsmittel enthaltenden Verbindungen.

Achtung

- Verwenden Sie nur alkoholfreie Lösungen und keine Lösungsmittel, die Aceton, Benzin o. ä. enthalten.
- Kein Wasser oder Desinfektionslösung in den elektrischen Anschluss (Steckerbuchse des Handapparates) gelangen lassen.

Achtung! Membran

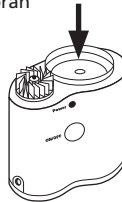

Am Boden der Medikamentenkammer befindet sich eine Kunststoff-Membran. Diese sollte behutsam behandelt und gereinigt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Sollte die Kunststoff-Membran beschädigt sein, benutzen Sie das Gerät nicht, sondern wenden Sie sich bitte an eine Servicestelle.

Wechseln des Luftfilters

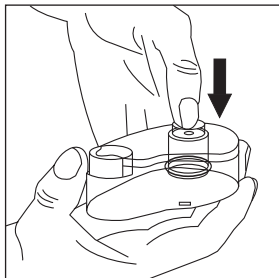


Abb. 1

1. Der Luftfilter muss ersetzt werden, wenn er verschmutzt oder beschädigt ist. Entfernen Sie die Prallplatte aus der Verneblerabdeckung, indem Sie sie in dem Aerosolaustragsdom nach unten drücken.

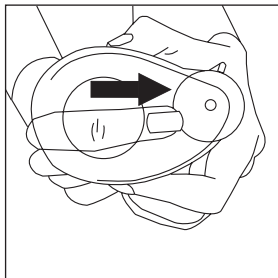


Abb. 2

2. Innerhalb der Verneblerabdeckung lässt sich der Filterhalter (durch den Öffnungsschlitz) aus der Halterung nach außen drücken.

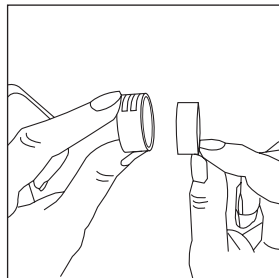


Abb. 3

3. Entnehmen Sie den Filter und ersetzen Sie ihn durch einen Neuen. Setzen Sie alle Teile wieder zusammen.

Hinweise bei Betriebsstörungen

Fehler	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Das Gerät funktioniert nicht nach dem Einschalten.	<ol style="list-style-type: none">1. Ist die Stromversorgung über Netzgerät, Akku oder Zigarettenanzünder-Adapter gewährleistet?2. Ist die Zigarettenanzünder-Buchse im Auto stromlos?3. Ist der Akku geladen?	<ol style="list-style-type: none">1. Steckverbindungen überprüfen und Stecker fest eindrücken.2. Gegebenenfalls Zündung einschalten.3. Akku laden wie auf S. 16 beschrieben.
Es wird kein Aerosol erzeugt.	<ol style="list-style-type: none">1. Ist keine Lösung in der Medikamentenkammer?2. Ist zwischen Medikamentenkammer und Medikamenten-Einsatz Transferwasser vorhanden?	<ol style="list-style-type: none">1. Inhalationslösung wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben einfüllen.2. Transferwasser (2-3 Tropfen) einfüllen
Es wird zu wenig Aerosol erzeugt.	<ol style="list-style-type: none">1. Ist der Luftfilter verschmutzt?2. Ist nicht genügend Lösung in der Medikamentenkammer?3. Spannung oder Leistung ist zu niedrig?4. Zu hoher Luftstrom?	<ol style="list-style-type: none">1. Wechseln Sie den Filter.2. Füllen Sie etwas Medikamentenlösung nach.3. Überprüfen Sie die Spannung oder Zustand des Akkus.4. Regulieren Sie den Luftstrom.
Das Gerät läuft einige Zeit und schaltet dann ab.	Ist der Timer abgelaufen?	Drücken Sie den EIN/AUS-Taster.

Das Gerät schaltet sich nach 3 Min. Betriebsdauer automatisch ab. Sollte die Medikamentenlösung noch nicht aufgebraucht sein (bis auf 0,5 ml Restmenge), kann das Gerät erneut eingeschaltet werden.

Laden des Akkus

Wiederaufladbarer Akku

Ihr aerosonic® mobil Ultraschall-Vernebler kann mit einem wiederaufladbarem Akku betrieben werden.

Anmerkung

- Laden Sie den Akku mindestens 24 Stunden vor dem ersten Gebrauch oder nach einer längeren Lagerung, danach 4 bis 12 Stunden je nach der Dauer des Gebrauchs.
- Der Ladestrom wird auf der minimalsten Stufe gehalten, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Deshalb wird empfohlen, den Akku nach jedem Einsatz zu laden, möglichst über Nacht.

Laden des Akkus

1. Stecken Sie das Netzgerät in eine Netzsteckdose.
2. Stecken Sie den 12 V-Stecker des Netzgerätes in die Stromversorgungsbuchse auf der Unterseite des Akkus (Abb. 1).

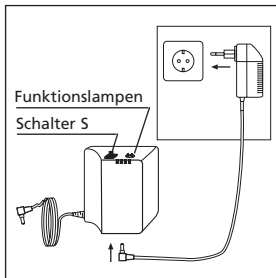


Abb. 1

3. Schalten Sie den Akku ein, indem Sie den Schalter S nach (ON) schieben. Der Ladevorgang wird optisch angezeigt durch eine grün aufleuchtende Funktionslampe.
- Ein voll geladener Akku reicht für eine kontinuierliche Betriebsdauer von 20 bis 30 Minuten.

Achtung

Ein voll geladener Akku entlädt sich auch bei Nichtbenutzung im Laufe der Zeit von selbst.


Beachten Sie beim Umgang mit dem Akku

- Um den Akku betreiben zu können, muss sich der Schalter S in der Position (ON) befinden. Ist der Akku einsatzbereit, leuchtet die grüne Funktionslampe auf.
- Bei Aufleuchten der roten Funktionslampe bzw. wenn keine Lampe leuchtet, muss der Akku geladen werden.
- Nach Gebrauch schalten Sie den Akku immer aus, indem Sie den Schalter S in die linke Position schieben.
- Verwenden Sie den Akku nur zum Betrieb des aerosonic® mobil Verneblers und setzen Sie ihn nicht für andere Zwecke ein.
- Lagern Sie den Akku nicht in direktem Sonnenlicht, unter höheren Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- Bewahren Sie das Gerät immer mit herausgezogenen Steckern auf, wenn Sie es nicht brauchen.


Ersatzteile (Verbrauchsmaterial)





Mundstück

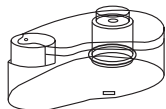

Vernebler-
abdeckung: 85165

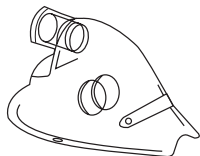

Maske
Erwachsene: 85185
Kinder: 85180

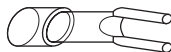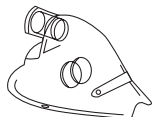

Nasengabel



Maskenadapter



Adapter für
Mundstück und
Nasengabel



Luftfilter
(2 Stück)



Medikamenteneinsätze
(5 Stück): 82135









Hinweis

Die Verbrauchsmaterialien Verneblerabdeckung, Medikamenteneinsätze, Mundstück, Ausatem-Ventil, Masken, Nasengabel, Adapter und Luftfilter sind je nach Anzahl der täglichen Inhalationen und Beanspruchung durch Reinigung und Desinfektion auszutauschen; spätestens dann, wenn die Teile unansehnlich werden oder Beschädigungen aufweisen.

Für Nachbestellungen von Verbrauchsmaterial wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Apotheker.

Die Entsorgung der Verbrauchsmaterialien kann nach Reinigung im „gelben Sack“ (Tonne) erfolgen.

Erklärung der Zeichen

Symbol	Bedeutung
DC	Gleichspannung
AC	Wechselspannung
IP XY	Schutzgrad gegen Eindringen von Staub (X) und Wasser (Y)
	Achtung, Begleitpapiere beachten
	AWT des Typs B (AWT: Anwendungsteil)
	Zentral positiv (Anschluss DC 12 V)
	Prüfzeichen
	Nicht in Feuchträumen benutzen
	Kein Eingriff durch unbefugte Stellen
	Entsorgung mit dem Hausmüll nicht zulässig
	

Technische Daten – aerosonic® mobil

Verneblungsart:	Ultraschall-Zerstäubung
Nennspannung:	230 V ~ , abweichende Spannung auf Anfrage
Leistung:	18 W
Schwingerfrequenz:	2,5 MHz
Verneblerleistung:	0,35 ml/Min.
Teilchenspektrum:	1,5 bis 5,7 µm (MMAD 3,8 Mikron)
Medikamentenkammer max. Füllmenge:	8 ml
Gewicht:	260 g
Geräteabmessungen:	6 x 8,35 x 16,9 cm (L x B x H)
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit:	5° C bis 40° C 30% bis 95% RH
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit:	1° C bis 40° C, 10% bis 95% RH
Klassifikation:	Schutzklasse II

Luftdruckbereich für Transport und Lagerung: 500 bis 1060 mb

Technische Daten des Akkus

Batterietyp:	Ni-MH (ohne Memory-Effekt)
Batterie-Spannung:	12 V DC
Lade-Spannung:	12 V DC
Ladestrom:	40 bis 70 mA
Ladezeit:	Minimum 24 Stunden für die Erstladung; danach 4 bis 12 Stunden, abhängig von der Inanspruchnahme
Akkukapazität:	600 mAh/12 V DC (20 bis 30 Min. kontinuierliche Anwendung)
Betriebstemperatur:	0° C bis 45° C
Lagerungstemperatur:	-18° C bis 45° C
Abmessungen:	8 x 4,9 x 8,7 cm
Gewicht:	ca. 240 g

Die geschlossene Transfer-Medium-Kammer enthält eine Lösung von Benzalkonium Chlorid zu 0,01%.

Wir behalten uns eine Änderung der technischen Daten und der Gestaltung ohne vorherige Ankündigung vor.

Garantiebedingungen

Während der Garantiezeit beseitigen wir oder unser Kundendienst Fabrikations- oder Materialfehler unentgeltlich. Ein Anspruch auf Wandlung, Minderung oder Rücktritt besteht nicht. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung des Geräts oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, fallen nicht unter diese Garantie.

Die Garantie erlischt auch bei Eingriffen am Gerät durch hierzu nicht befugte Stellen. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird im Rahmen dieser Garantie nicht gewährt.

Mechanische Beschädigungen an der Medikamentenkammer sind von der Garantieausgenommen. Die Abdeckhaube, das Netzkabel und das Verbrauchsmaterial sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

Bitte senden Sie bei Reklamationen nur Grundgerät und Netzkabel an Ihren Fachhändler bzw. an uns zurück.



Die Garantie läuft ab Kaufdatum und beträgt 24 Monate.

Wichtiger Service-Hinweis

Das Inhalationsgerät aerosonic® mobil ist ein elektrisch betriebenes Gerät. Es darf weder unbeaufsichtigt noch in explosionsgefährdende Bereichen oder in Feuchträumen eingesetzt werden. Jede Handhabung an dem Gerät setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung voraus.


Die Instandsetzung des Gerätes erfolgt durch uns oder eine von uns dazu ermächtigte Service-Stelle. Bei Reparaturen durch von uns ermächtigte Stellen verlangen Sie von diesen eine Bescheinigung über Datum, Art und Umfang der Reparatur sowie Firmenangabe und Unterschrift. Zum Betrieb des Gerätes darf nur Original-Zubehör verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise erlischt die Haftung der Flores medical GmbH.

Hinweis für Rücklieferungen

Sendet der Käufer das Gerät an den Verkäufer oder Hersteller ein, liegen die Transportkosten beim Käufer. Für unfrei angelieferte Ware wird die Annahme und zu Lasten des Versenders zurückgeschickt. Sollten Sie Fragen zum Postversand haben, dann wenden Sie sich bitte an uns.

Benutzerinformation

zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)

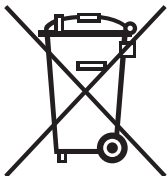

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wieder verwendbar sind.

Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegennehmen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben könnten.

Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Für Geschäftskunden der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für Sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Hersteller:
SAN UP S.A.
Buenos Aires
Argentinien



EU Repräsentant:
EE t eant ate ene
eant ate ene
Raett erts R U

Vertrieb durch:

Flores medical GmbH

Inhalationstechnologie
Auwiesen 12
D-07330 Probstzella
T +49 (0) 36735 463-0
F +49 (0) 36735 463-44
info@flores-medical.de
www.multisonic.de

Ausgabe 1106